



Función de tecla

- Flecha arriba Incremento de nivel de canal 1 ^(a)
- Flecha abajo Descenso de nivel de canal 1 ^(a)
- Flecha izquierda Frecuencia abajo ^(b)
- Flecha derecha Frecuencia arriba ^(b)
- Barra espaciadora Canal 1 encendido (ó Apagado en caso del modo inverso)
- Alt / AltGr Canal 2 encendido (ó Apagado en caso del modo inverso)
- N Encendido/apagado de canal 1 continuo
- M Encendido/apagado de canal 2 continuo (normalmente enmascarando)
- S Almacenar punto actual
- Mantener pulsada la tecla S alterna entre el símbolo de guardar, – símbolo de no respuesta (símbolo con la flecha hacia abajo) – símbolo de respuesta en el límite (símbolo con la flecha hacia arriba, y – ningún símbolo visualizado

^(a) (a) La operación depende de la "Dirección de nivel de la tecla de flecha" - Herramientas > Opciones
^(b) (b) La frecuencia envolvente alrededor del margen

Función de tecla

- L Ruta izquierda en canal 1 ^(a)
- R Ruta derecha en canal 1 ^(a)
- B Ruta binaural en canal 1 ^(a)
- F5 Reproducir/Detener el reproductor del habla
- T Umbral o SRT
- C MCL
- U UCL
- D SDT
- W WRS/SRS

Teclado numérico

- 1-9 Puntuación de fonema/oración
- + / - Wordscoring

^(a) (a) Enmascaramiento contralateral. Si se cambia la ruta del canal de estímulo de l a D ó D a l, al mismo tiempo, la ruta de los canales de enmascaramiento cambiará de l a D, ó D a l para mantener el enmascaramiento ipsilateral.

Selección de estímulo

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Tono | Habla |
| 1 = Tono | 1 = Mic (Prueba de voz en directo) |
| 2 = Gorjeo | 2 = Fuente A (grabación) |
| 3 = Ruido FRESH | 3 = Fuente B (grabación) |

Comunicaciones

- F/F2 Micrófono transmisor ^(a)
- P Nivel micrófono receptor ^(b)
- A Hablar al asistente

^(a) Pulsar y mantener pulsado activa el micrófono transmisor. Las flechas Izquierda/Derecha ajustan el nivel de salida
^(b) Flechas Izquierda/Derecha ajustan el nivel de salida

Teclado numérico 1-9 Puntuación de fonema/oración



Otros accesos directos

- | | |
|-----------------------------|----------|
| Nueva sesión | Ctrl + N |
| Detalles de paciente | Ctrl + D |
| Abrir | Ctrl + O |
| Guardar | Ctrl + S |
| Imprimir | Ctrl + P |
| Salir | Alt + F4 |
| Pestaña de prueba anterior | RePág |
| Pestaña de siguiente prueba | AvPág |
| Propiedades Aud | Ctrl+U |
| Alternar oído de estímulo | Ctrl + E |
| Opciones | Ctrl+M |
| Selector de prueba | F8 |