



### Tastenfunktion

Pfeil nach oben	Pegel für Kanal 1 erhöhen <sup>(a)</sup>
Pfeil nach unten	Pegel für Kanal 1 senken <sup>(a)</sup>
Pfeil nach links	Frequenz senken <sup>(b)</sup>
Pfeil nach rechts	Frequenz erhöhen <sup>(b)</sup>
Leertaste	Kanal 1 ein (bei invertiertem Modus: aus)
N	Kanal 1 endlos ein/aus
M	Kanal 2 endlos ein/aus
S	Aktuellen Punkt speichern
	Wenn Sie die S-Taste gedrückt halten, wird zwischen folgenden Symbolen umgeschaltet:
	– Keine Antwort (Abwärts-Pfeil)
	– Antwort am Limit (Aufwärts-Pfeil)
	– kein Symbol

<sup>(a)</sup> Funktion hängt von der Einstellung „Pegelrichtung der Pfeiltasten“ unter Extras > Optionen ab  
<sup>(b)</sup> Frequenzumlauf (zyklisch)

### Tastenfunktion

L	Linke Zuordnung von Kanal 1 <sup>(a)</sup>
R	Rechte Zuordnung von Kanal 1 <sup>(a)</sup>
B	Binaurale Zuordnung von Kanal 1 <sup>(a)</sup>
F8	Öffnet die Testauswahl
H	Schwellwert oder SRT
C	MCL
U	UCL
W	SDT
D	WRS/SRS
A	Mit Assistent sprechen

### Ziffernblock

1-9	Phoneme/Satz zählen
+/-	Wörter zählen

<sup>(a)</sup> Kontralaterale Vertäubung, Wenn die Zuordnung des Stimuluskanals von L nach R oder von R nach L geändert wird, ändert sich gleichzeitig auch die Zuordnung der Vertäubungskanäle von L zu R bzw. von R zu L, damit die ipsilaterale Vertäubung bestehen bleibt.

### Stimulusauswahl

<b>Ton</b>	<b>Sprache</b>
1 = Ton	1 = Mikrofon (Live-Sprachtest)
2 = Wobbel	2 = Quelle A (Aufnahme)
3 = Schmalbandrauschen	3 = Quelle B (Aufnahme)

### Kommunikation

F/F2	Mit Patienten sprechen <sup>(a)</sup>
P	Pegel für Mithören <sup>(b)</sup>
A	Mit Assistent sprechen

<sup>(a)</sup> Gedrückt halten aktiviert „Mit Patienten sprechen“. Die Ausgabestärke kann dann mit den Pfeiltasten nach links/rechts eingestellt werden.  
<sup>(b)</sup> Die Ausgabestärke kann mit den Pfeiltasten nach links/rechts eingestellt werden.

### Sonstige Tastenkürzel

Neue Untersuchung	Strg+N
Patientendaten	Strg+D
Öffnen	Strg+O
Speichern	Strg+S
Drucken	Strg+P
Beenden	Alt+F4
Letzte Untersuchungsregisterkarte	Bildauf
Nächste Untersuchungsregisterkarte	Bildab
Audioeigenschaften	Strg+U
Stimulusohr umschalten	Strg+E
Optionen	Strg+M
Testauswahl	F8