

Tasti di scelta rapida



Funzioni dei tasti

- Freccia su Canale 1 livello ^(a)
 - Freccia giù Canale 1 livello giù ^(a)
 - Freccia sinistra Frequenza giù ^(b)
 - Freccia destra Frequenza su ^(b)
 - Barra spaziatrice Canale 1 on (o Off in caso di modalità inversa)
 - Alt / AltGr Canale 2 on (o Off in caso di modalità inversa)
 - N Canale 1 Continuo on/off
 - M Canale 2 Continuo on/off (mascheramento tipico)
 - S Memorizza punto corrente
- Tenendo premuto il tasto S è possibile alternare tra il simbolo di memorizzazione,
 – il simbolo di risposta nulla (simbolo con freccia in giù)
 – risposta al simbolo limite (simbolo con freccia in su, e
 – nessun simbolo visualizzato

^(a) Il funzionamento dipenderà dalla "Direzione del livello del tasto freccia" – Strumenti->Opzioni
^(b) Sovrapposizione di frequenza attorno all'estremità

Funzioni dei tasti

- L Lato sinistro su canale 1 ^(a)
- R Lato destro su canale 1 ^(a)
- B Lato binaurale su Canale 1 ^(a)
- F5 Lettore vocale Play/Stop
- T Soglia o SRT
- C MCL
- U UCL
- D SDT
- W WRS/SRS

Numpad

- 1-9 Fonema/Punteggio frasi
- + / - Punteggio parole

^(a) Mascheramento contralaterale. Se il lato del canale di stimolo passa da L a R o da R a L, allo stesso tempo, il lato dei canali di mascheramento passerà da L a R, o da R a L per mantenere il mascheramento ipsilaterale

Selezioni stimolo

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| Tone | Vocale |
| 1 = Tono | 1 = Mic (Test vocale dal vivo) |
| 2 = Trillo | 2 = Sorgente A (registrazione) |
| 3 = FRESH Noise | 3 = Sorgente B (registrazione) |

Comunicazioni

- F/F2 Talk Forward ^(a)
- P Livello Talk Back ^(b)
- A Parlare con assistente

^(a) Premendo e tenendo premuto si attiva il Talk Forward. Quindi i tasti freccia sinistra/destra regolano il livello di uscita
^(b) Quindi i tasti freccia sinistra/destra regolano il livello di uscita

**Numpad 1-9:
Fonema/Punteggio frasi**



Livello (su/giù)
Frequenza (destra/sinistra)
Ch2 = Shift+tasto